



# PANDUAN PELAKSANAAN GENOSE

NOMOR DOKUMEN : PA-01-BSPT-2021-001

BIRO SARANA PRASARANA DAN TRANSPORTASI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

2021



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 ☎(061) 8455571 PO. Box 1099 MEDAN ~ INDONESIA

Homepage : <http://www.pancabudi.ac.id> e-mail : [unpab@pancabudi.ac.id](mailto:unpab@pancabudi.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**NOMOR : 101 /02 /R/2021**

**TENTANG**  
**PANDUAN PELAKSANAAN GENOSE**  
**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pencegahan penularan Virus Covid 19 di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi;
2. Bahwa untuk menyesuaikan kehidupan New Normal di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi di perlukan Pelaksanaan Protokol Kesehatan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas maka di perlukan Panduan Pelaksanaan GeNose di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi;
4. Bahwa berdasarkan Poin 3 di atas diperlukan Surat keputusan Rektor Tentang Pemberlakuan Panduan Pelaksanaan GeNose;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Memperhatikan** : 1. Pedoman Pelaksanaan Sarana dan Prasarana UNPAB
2. Pedoman Akademik MBKM Tahun 2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan:**
- Pertama** : Memberlakukan Panduan Pelaksanaan GeNose di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi;
- Kedua** : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Salinan Surat Keputusan Rektor ini di tembuskan /disampaikan kepada :
1. Yth. Rektor 1, 2, & 3 UNPAB
  2. Yth. Ketua Pusat Studi se-UNPAB
  3. Yth. Dekan dan Kaprodi se-UNPAB
  4. Yth. PPMU UNPAB
  5. Yth. PRDP UNPAB
  6. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. Divisi dan Ka. Ur Se-UNPAB
  7. Arsip

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal, 5 Juli 2021

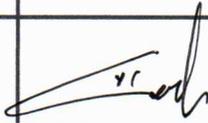
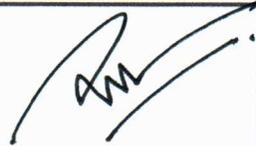


**Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE.,M.M.**

**PANDUAN PELAKSANAAN GENOSE UNIVERSITAS  
PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

No. Dok. : PM-DPMI-01-03  
Revisi : 00  
Tgl. Eff : 15 Januari 2021

**LEMBAR PENGESAHAN**

	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	Yonnedikav	Ka. BSPT		28 - Juni - 2021
	Ul Biosila, SH	Ka. UPIT		28 - Juni - 2021
	Muhammad Saleh Rizkian, SE	Ka. DPMI		28 Juni 2021
	Agus Maksum, S.Kom	Pegawai DPMI		28 - Juni 2021
Diperiksa Oleh	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
	Cahyo Pramono, SE.,MM	Rektor Bidang Akademik dan Mahasiswa		29 / Juni 2021.
	Hasrul Azwar Hasibuan, SE.,MM	Rektor Bidang Keuangan dan Infrasruktur		29 Juni 2021
	Dr. Henry Aspan, SE.,SH.,MA.,MH.,MM	Rektor Bidang Tata Kelola		2 / 7 / 2021
	Husni Muharram Ritonga, BA., MSc	Ka. PPMU		2 / 7 / 2021
Disahkan Oleh	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM	Rektor		2 / 7 2021



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**



## **DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>PANDUAN TATA LAKSANA PEMERIKSAAN GENOSE</b> .....	<b>1</b>
<b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI</b> .....	<b>1</b>
<b>A. OPERATOR GENOSE</b> .....	<b>1</b>
<b>B. PENGGUNA GENOSE</b> .....	<b>2</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b> .....	<b>2</b>
<b>D. PELAPORAN</b> .....	<b>3</b>
<b>E. STRILISASI</b> .....	<b>3</b>

## **PANDUAN TATA LAKSANA PEMERIKSAAN GENOSE UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

### **A. OPERATOR GENOSE**

1. Selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum dan sesudah tindakan.
2. Memakai Alat Pelindung Diri ( APD ) seperti sarung tangan, masker, face Shield dan baju APD apabila diperlukan.
3. Memastikan Individu yang akan dites diedukasi dengan baik cara untuk menghembuskan nafas kedalam kantong nafas hingga penuh, baik secara progresif langsung maupun perlahan.
4. Pastikan sebelum meniup kantong sampel, pasien diinstruksikan melakukan 3x proses pengambilan nafas dan pembuangan nafas ke 3 dihembuskan ke kantong sample
5. Diwajibkan menyediakan tempat sampah infeksius.
6. Membuang kantong sample pada sampah medis untuk menghindarkan kontaminasi.
7. Jarak antara operator dan pasien minimal 1 meter
8. Seorang operator tidak dibenarkan memberikan atau memberitahukan hasil uji genose kepada orang lain selain pasien yang bersangkutan
9. Menjaga kerahasiaan hasil tes Genose
10. Hepa filter wajib diganti per 100 kantong atau apabila terdapat pembacaan POSITIF maka HEFA filter wajib diganti.

## **B. PENGGUNA GENOSE**

1. Sebelum proses pengambilan sample pengguna Genose dianjurkan untuk tidak makan, minum, dan merokok atau puasa selama 30 menit.
2. Apabila pengguna terindikasi Positif akan dilakukan pemeriksaan ulang maksimal 3 kali
3. Menjaga jarak dengan operator minimal 1 meter
4. Menjaga jarak dengan sesama pasien minimal 1 meter
5. Menjaga kerahasiaan hasil uji Genose kepada orang lain

## **C. PEMBIAYAAN**

### **1. Mahasiswa**

Biaya pemeriksaan Covid-19 dengan menggunakan alat GeNose untuk mahasiswa yang melakukan sidang meja hijau ditetapkan sebesar Rp 100.000 yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan penguji sidang.

### **2. Pegawai**

Biaya pemeriksaan Covid-19 dengan menggunakan alat GeNose ditetapkan sebesar Rp 10.000 untuk setiap kantong udara yang digunakan , dan sebesar Rp 35.000 untuk Hepa filter apabila pengguna terindikasi positif Covid-19.

### **3. Digunakan Pihak Luar atau External**

Biaya pemeriksaan Covid-19 dengan menggunakan alat GeNose ditetapkan sebesar Rp. 40.000 untuk setiap kantong udara yang digunakan dan Rp. 35.000 untuk Hepa filter apabila pengguna terindikasi positif Covid-19. Serta membayar sewa alat GeNose sebesar Rp.500.000,- per kegiatan.

#### **D. PELAPORAN**

1. Pelaporan hasil Genose per individu bisa dilakukan melalui email WhatsApp dan bisa juga di cetak.
2. Pelaporan aktivitas Genose tercatat di Log Book BSPT.

#### **E. STRILISASI**

Prosedur sterilisasi sama dengan prosedur desinfeksi. Agar perangkat dalam keadaan steril, patuhi Protocol kesehatan. Disposable HEPA Filter wajib digunakan pada saat analisis sample nafas.